




**POLYMEDICAL
DE COLOMBIA S.A.S.**

NIT. 900.015.175-0

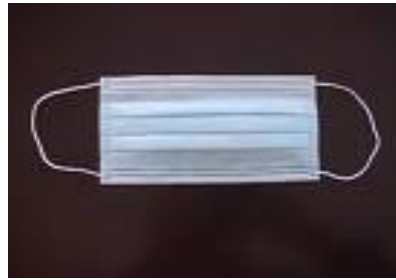

FICHA TECNICA

Importador	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S
Dirección:	TRANSVERSAL 76 # 46-21
Ciudad:	Bogota - Colombia
Email:	polymedicaldecolombia@gmail.com - ventas@polymedicaldecolombia.com
Elaboró:	Teléfono :
Dirección técnica	2631081-6042996

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPABOCAS DESECHABLES CON ELÁSTICO	CODIGO:	TAP001-A
DESCRIPCION:	Los tapabocas HandelMed tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.		
USOS:	Este producto es de uso personal, industrial, médico, laboratorios y profesionales de la belleza.		
PRESENTACION	Caja que contiene 50 unds.		

COMPOSICIÓN

COMPONENTE	FUNCION
<i>CUERPO DEL TAPABOCA</i>	Compuesto de: 2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de meltblown (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos.
<i>ELASTICO DE SUJECION</i>	Cada tapabocas cuenta con 2 elasticos de sujecion con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a la cara del usuario.
<i>SOPORTE NASAL</i>	Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.

PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	Tela no tejida	COLOR	Azul / blanco	GRAMAJE	3,6 +/- 0,3g
OTROS			25-17-25		

PRESENTACION

EMPAQUE	DESCRIPCION	MATERIAL	DIMENSIONES	TOTAL UNIDADES
Comercial	Paquete	N/A	N/A	50 Tapabocas

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo.
- 2) El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir que cubre completamente nariz y boca.
- 3) Coloque las tiras de amarrar de la siguiente manera:
 - a) Coloque la primera cinta sujetadora (cinta superior) en la parte superior de la cabeza y amarre.
 - b) Coloque la segunda cinta (inferior) alrededor de la cabeza y posiciónela arriba del cuello y debajo de las orejas y amarre.
- 4) Coloque los dedos de ambas manos sobre el soporte nasal (tira de metal en la parte superior del cuerpo del tapabocas). Moldee el ajustador alrededor de su nariz mediante el movimiento de los dedos a ambos lados del metal.
- 5) El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

CUALIDADES DEL PRODUCTO

Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales
Comodidad para uso prolongado.
Alta resistencia a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto con salpicaduras de fluidos y/o sangre.
No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad
Sellado con ultrasonido, garantizando alta resistencia y protección
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar en el usuario.
Permite respiración normal.
Prácticos empaques que generan mayor asepsia y facilitan el manejo y uso del producto. Display resistente que garantizan protección al producto y cuenta con sistema que facilita la extracción de los tapabocas sin tocar ni ensuciar el resto del contenido
No es tóxico

